

ABLAUFBESCHREIBUNG

Schritt 1: TESTUNG

1.



Sie führen den Test selbstständig (mit Ihrem Kind durch), indem Sie (bzw. Ihre Tochter/Ihr Sohn) 30 Sekunden auf dem Abstrichtupfer lutscht. Der Lolli-Abstrichtupfer (erkennbar an dem integrierten Röhrchen) wird nach dem Test fest verschlossen.

2.



Bitte bekleben Sie das (integrierte) Röhrchen senkrecht und zentral mit dem beigefügten Barcode „Probe-Einzeltestung“. Bitte verkleben Sie **nicht** den Verschluss.

Dieses ist bereits durch die Schule geschehen!



3.



Legen Sie das (integrierte) Röhrchen für die Einzeltestung in eine Plastiktüte.

Schritt 2: REGISTRIERUNG IHRER PATIENTENDATEN

4.



LABUNIQ

Bitte entnehmen Sie die „Anleitung zur REGISTRIERUNG der PCR-EINZELTESTUNG“ und erfassen die Patientendaten und die QR-Code-No. im LABUNIQ-Portal.

Dieser Barcode dient auch der Befundabfrage.

Die Anleitung zur Registrierung der PCR-Einzeltestung können Sie der Homepage der Rosshauptschule entnehmen: www.rosshauptschule-gladbeck.de / Information

Schritt 3: PROBE IN DIE SCHULE BRINGEN

5.



Nach erfolgreicher Erfassung der Patientendaten in LABUNIQ muss die Probe **bis spätestens 08:30 Uhr** am darauffolgenden Tag von Ihnen in die Schule gebracht werden. Bitte lassen Sie die Probe dem/der Corona-Beauftragte/n Ihrer Schule zukommen.